

Versie: 31 - docnr: 059665
 Geldig vanaf: december 2023

Bepalingen (routine) laboratorium Klinische Farmacie & Toxicologie

Zoeken in doc m.b.v. CTRL-F

Geneesmiddel (inclusief metabolieten)	Gevalideerd	Mnemonic GLIMS	Therapeutische ref. waarde (mg/l) (2)	Verwijzing ISO 15189 scope*	Synoniem	Literatuur-referentie (4)	Materiaal (1)	Hoeveelheid materiaal	Monstervoorbereiding	Opslag-condities	Bewaartermijn monster	Geneesmiddelen-groep	Tijd tussen toediening en afname (uur) Daar betekent prik bloed tenminste 4 uur na inname, bij voorkeur vlak voor nieuwe gift; achter 'Top' staat de optimale priktijd vermeld (3)	Bepalingsfrequentie / maximale uitslagtermijn (en dagen)	Werklijst GLIMS	Bepalingen in rondzending	Onafhankelijk e controles worden mesgenomen bij analyse
2-Propanol	Ja	A_2-Propanol_X_BLD	Toxisch: > 500 mg/L	Valt buiten de ISO 15189 scope	isopropanol, isopropylalcohol	L4	B (EDTA) 1)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t.; acuut toxicologisch onderzoek	Toxicologie		Aleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker	VLA_Toxicologie	LGCP T	Ja
Aceton	Ja	A_Aceton_X_BLD	Toxisch: > 200 mg/L	Valt buiten de ISO 15189 scope	dimethylketon	L4	B (EDTA) 1)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t.; acuut toxicologisch onderzoek	Toxicologie		Aleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker	VLA_Toxicologie	LGCP T	Ja
Adalimumab IgG tegen adalimumab	Ja	A_Adalimumab_X_SER A_X-IgG-tegen-adali_X_SER	S: 5,0-12,0 Referentiewaardes uitvoerend laboratorium	Interpretatie KFL: KF.TDM.03 Technische uitvoering MMB: MM.VID Vast element 16	Humira, Hyrimoz	L34	S	Serum Stolbuis 1x5,0 ml		Diepvries 20°C, ruimte C2-28	1 maand	Overigen	Dal	14 14 (Sanquin)	N.v.t. VLA_Uit-Sanquin-inv		Ja CTCB en Round Robin
Alprazolam	Ja	A_Alprazolam_X_EDTA	0,005-0,050 Toxisch: > 0,100	KF.TDM.02		L5	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	30 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Benzodiazepines	LGC PT	Ja
Amfetamines	Ja		Kwalitatief	Interpretatie KFL: KF.TOX.03 Technische uitvoering KCHL: KF.TOX Vast element 01	DOA screening		U	Urine 1x8,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Zie L20	Toxicologie		Dagelijks		KKGT	Ja
Amiodaron N-desethylamiodaron Som amio+de-amio	Ja	A_Amiodaron_X_EDTA A_Deamidaron_X_EDTA A_Som-amio-deamio_X_EDTA	S: 1,0-2,5 N.v.t. S: 1,0-4,0	KF.TDM.02	Cordarone	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml	materiaal na afname bij binnenkomst op KCHL 10 minuten centrifugeren; plasma afpipetteren; vries de buis in bij 20°C	Diepvries -20°C, ruimte C2-28	14 dagen	Anti-arrhythmica & Cardionica	Dal	7	VLA_Antiarrhythmica	LGC PT	Ja
Amisulpride	Ja	A_Amisulpride_X_EDTA	S: 0,200-0,320	KF.TDM.02	Aktiprol	L15+L16+L17+L18	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Nog geen gegevens bekend	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Antipsych	LGC PT	Ja
Amiripryline Norprityline Som ami+nor E-10-OH-norprityline Z-10-OH-norprityline	Ja	A_Amiripryline_X_EDTA A_Norprityline_X_EDTA A_Som-ami-nor_X_EDTA A_E-norprityline_X_EDTA A_Z-norprityline_X_EDTA	N.v.t. S: 0,050-0,150 S: 0,100-0,300 N.v.t. N.v.t.	KF.TDM.02 E- en Z-OH nor: Valt buiten de ISO 15189 scope	Sarotex	L12	P / S 1)	EDTA-bloed 1x4,0 ml	materiaal na afname bij binnenkomst op KCHL 10 minuten centrifugeren; plasma afpipetteren en in koelkast opslaan.	Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	24 uur voorafgaand aan centrifugeren. Daarna 7 dagen.	Psychofarmaca	Dal	3, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_2	LGC PT	Ja
Amoxicilline	Ja	A_Amoxicilline_X_EDTA	Plasma totaal: 0,5-10,0 Plasma vrij: 0,5-6,0	Valt buiten de ISO 15189 scope		Onderzoek volgt	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml	materiaal na afname bij binnenkomst op KCHL 10 minuten centrifugeren; plasma afpipetteren; vries de buis in bij 20°C	Diepvries -20°C, ruimte C2-28	Max. 1 dag bij 2-8°C bewaren	Antibiotica	Dal	7	VLA_Antibiotica	nee	nee
Apixaban	Ja	A_Apixaban_X_EDTA	Normaalwaarden (let op: géén streefwaarden): 2dd 10mg: top: 111-572 µg/l – dal: 41-335 µg/l 2dd 5mg: top: 91- 321 µg/l – dal: 41-230 µg/l 2dd 2,5 mg: top: 30-153 µg/l – dal: 11-90 µg/l Let op: dit zijn géén vastgestelde streefwaarden	KF.TDM.02	Eliquis		P	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	8 dagen bij 2-8°C. Daarna nog 7 dagen bij -20°C of 14 dagen bij -70°C	Overigen	Dal en/of top	14	VLA_NOACs	ECAT EQA	Ja
Aripiprazol	Ja	A_Aripiprazol_X_EDTA	S: 0,100-0,300	KF.TDM.02	Abilify	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Antipsych	LGC PT	Ja
Asparaginase	Ja	A_X-Asparaginase_X_SER	> 100 IU/L	Valt buiten de ISO 15189 scope	Oncaspar, PEG-asparaginase, Erwinase	L22.23	S	Serum Stolbuis 1x3,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	72 uur	Overigen	Dal (2 weken na vorige gift)	14 (Prinses Maxima Centrum)	VLA_Uit-Maxim-C-inv	Nee	Ja
Azathioprine 6-TG 6-MMP	Ja	profiel A_X-6-Thioguanine_X_LHB A_X-6-MMP_X_LHB	N.v.t.; werkzame metabolieten 6-TG en 6-MMP worden bepaald S: 250-500 pmol/8x10 ⁹ RBC S: < 7000 pmol/8x10 ⁹ RBC	KF.TDM.02	Imuran, Azafalk	L12	B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Immunosuppressiva	Dal	7	VLA_Thiopurines	KKGT	Ja

Geneesmiddel (inclusief metabolieten)	Gevalideerd	Mnemonic GLIMS	Therapeutische ref. waarde (mg/l) (2)	Verwijzing ISO 15189 scope*	Synoniem	Literatuur-referentie (4)	Materiaal (1)	Hoeveheid materiaal	Monstervorbereiding	Opslag-omstandigheden	Bewaartermijn monster	Geneesmiddelengroep	Tijd tussen toediening en afname (uur) 'Dal' betekent: prik bloed tenminste 4 uur na inname, bij voorkeur vlak voor nieuwe gift; achter 'Top' staat de optimale priktijd vermeld (3)	Bepalingsfrequentie / maximale uitslagtermijn (in dagen)	Werklijst GLIMS	Bepalingen in rondzending	Onafhankelijk e controles worden meegenomen bij analyse
Benzodiazepines	Ja		Kwalitatief	Interpretatie KFL: KF.TOX.03 Technische uitvoering KCHL: KF.TOX Vast element 01	DOA screening		U	Urine 1x8,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Zie L20	Psychofarmaca		Dagelijks		KKGT	Ja
Benzylicilline	Ja	A_Benzylicilline_X_EDTA	Plasma totaal (continue toediening): 18,0-30,0 Plasma vrij (continue toediening): 8,0-15,0	Valt buiten de ISO 15189 scope	Penicilline	Onderzoek volgt	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml	materiaal na afname bij binnenkomst op KCHL 10 minuten centrifugeren; plasma afpipetteren; vries de buis in bij 20°C	Diepvries -20°C, ruimte C2-28	Max. 1 dag bij 2-8°C bewaren	Antibiotica	N.v.t. bij continue toediening	7	VLA_Antibiotica	KKGT	nee
Biologicals	N.v.t.	A_X-Biologicals_X_SER	Referentiewaardes uitvoerend laboratorium	N.v.t.			S	Serum Stolbuis 1x5,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t., externe bepaling	Overigen	Dal	14 (Sanquin)	VLA_Uitb-Sanquin-inv	Round Robin	Ja
Brivaracetam	Ja	A_Brivaracetam_X_EDTA	0,2-2,0	KF.TDM.02	Briviact		P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Onderzoek volgt	Anti-epileptica	Dal	7	VLA_Anti-epileptica	LGC PT	Ja
Bupropion Hydroxybupropion	Ja	A_Bupropion_X_EDTA A_Hydroxybupropion_X_EDTA	N.v.t. 0,575-1,500	KF.TDM.02	Wellbutin, Zyban		P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml	materiaal na afname bij binnenkomst op KCHL 10 minuten centrifugeren; plasma afpipetteren; vries de buis in bij 20°C	Diepvries -20°C, ruimte C2-28	Onderzoek volgt	Psychofarmaca	Dal	7, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_1	KKGT	Ja
Carbamazepine	Ja	A_Carbamazepine_X_EDTA	S: 4,0-12,0	KF.TDM.02	Tegretol	L12	P / S (1)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	28 dagen in diepvries	Anti-epileptica	Dal	7	VLA_Anti-epileptica	LGC PT	Ja
Cariprazine	Ja	A_Cariprazine_X_EDTA	S: 5,0-20,0 µg/l	Valt buiten de ISO 15189 scope	Reagila	L37	P	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Nog geen gegevens bekend	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Antipsych_overig	Nee	Nee
Ceftazidim	Ja	A_Ceftazidim_X_EDTA	Plasma totaal: 25,0-45,0 Plasma vrij: 20,0-40,0	KF.TDM.02	Fortum		P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Onderzoek volgt	Antibiotica	Dal	7	VLA_Antibiotica	KKGT pilot & instant	Ja
Ceftriaxon	Ja	A_Ceftriaxon_X_EDTA A_Ceftriax-vrije-f-X_EDTA	Plasma totaal 5,0-80,0 Plasma vrij: 0,25-4,00	Valt buiten de ISO 15189 scope	Rocephin		P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml	materiaal na afname bij binnenkomst op KCHL 10 minuten centrifugeren; plasma afpipetteren; vries de buis in bij 20°C	Diepvries -20°C, ruimte C2-28	Max. 1 dag bij 2-8°C bewaren	Antibiotica	Dal	7	VLA_Antibiotica	nee	nee
Cefuroxim	Ja	A_Cefuroxim_X_EDTA	Plasma totaal: 0,5-32,0 Plasma vrij: 0,5-16,0	Valt buiten de ISO 15189 scope	Zinnat		P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Onderzoek volgt	Antibiotica	Dal	7	VLA_Antibiotica	nee	nee
Ciclosporine	Ja	A_Ciclosporine_X_BLD	S: 0,100-0,300	KF.TDM.02	Neoral	L12	B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Immunosuppressiva	Dal	7, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Immunosuppressiv	LGC PT	Ja
Ciprofloxacine	Ja	A_Ciprofloxacine_X_EDTA	Plasma totaal: 0,2-3,0 Plasma vrij: 0,1-2,0	KF.TDM.02	Ciproxin		P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Diepvries -20°C, ruimte C2-28	Max. 3 dagen bij 2-8°C bewaren	Antibiotica	Dal	7	VLA_Antibiotica	KKGT pilot	Ja
Citalopram Desmethylcitalopram	Ja	A_Citalopram_X_EDTA A_Dmethylcitalopram_X_EDTA	S: 0,050-0,200 Toxisch: 0,4-0,6 S: 0,025-0,050	KF.TDM.02	Cipramil	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Psychofarmaca	Dal	7, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_1	LGC PT	Ja
Clobazam Desmethylclobazam	Ja	A_Clobazam_X_EDTA A_Dmethylclobazam_X_EDTA	S: 0,030-0,400 S: 0,300-3,000	KF.TDM.02	Frisium	L12	P / S (1)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	9 dagen	Anti-epileptica	Dal	7	VLA_Benzodiazepines	LGC PT	Ja
Clomipramine Desmethylclomipramine Som clomi+dmclomi	Ja	A_Clomipramine_X_EDTA A_Dmethylclomipramine_X_EDTA A_Som-clomi-dmclomi_X_EDTA_int	N.v.t. N.v.t. S: 0,200-0,400	KF.TDM.02	Anafranil	L12	P / S (1)	EDTA-bloed 1x4,0 ml	materiaal na afname bij binnenkomst op KCHL 10 minuten centrifugeren; plasma afpipetteren en in koelkast opslaan.	Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	24 uur voorafgaand aan centrifugeren. Daarna 7 dagen.	Psychofarmaca	Dal	3, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_2	LGC PT	Ja
Clonazepam	Ja	A_Clonazepam_X_EDTA	S: 0,020-0,070	KF.TDM.02	Rivotril	L12,29	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Diepvries -20°C, ruimte C2-28	3 dagen bij 2-8°C; 14 dagen bij -20	Anti-epileptica	Dal	7	VLA_Benzodiazepines	LGC PT	Ja
Clorazepinezuur Desmethylclorazepam	Ja	profiel A_Dmethylclorazepam_X_EDTA	N.v.t.; werkzame metaboliet wordt bepaald S: 0,300-0,800	KF.TDM.02	Transiëne	L4	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t.; acuut toxicologisch onderzoek	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Benzodiazepines	LGC PT	Ja
Clozapine DBS	Ja	A_Clozapine-DBS_X_BLD	S: 0,200-0,600	Valt buiten de ISO 15189 scope		L12	DBS	DBS-bloed 3x20,0 µl		Kamertemp, ruimte C2-28	1 week bij kamertemp.	Psychofarmaca	12u na laatste gift	3, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Clozapine-DBS	LGC PT	Nee
Clozapine Desmethylclozapine	Ja	A_Clozapine_X_EDTA A_Dmethylclozapine_X_EDTA	S: 0,200-0,600	KF.TDM.02	Leponex	L12	P / S (1)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	48 uur in koelkast	Psychofarmaca	12u na laatste gift	3, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_2	LGC PT	Ja
Cocaine	Ja		Kwalitatief	Interpretatie KFL: KF.TOX.03 Technische uitvoering KCHL: KF.TOX Vast element 01	DOA screening		U	Urine 1x8,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Zie L20	Toxicologie		Dagelijks		KKGT	Ja
Coffeine	Volgt nog	A_Coffeine_X_EDTA	S: 8,0-20,0	Valt buiten de ISO 15189 scope	Caffeine	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Overigen	Dal	3	VLA_Overigen	LGC PT	Ja

Geneesmiddel (inclusief metabolieten)	Gevalideerd	Mnemonic GLIMS	Therapeutische ref. waarde (mg/l) (2)	Verwijzing ISO 15189 scope*	Synoniem	Literatuur-referentie (4)	Materiaal (1)	Hoeveelheid materiaal	Monstervoorbewerking	Opslag-condities	Bewaartermijn monster	Geneesmiddelengroep	Tijd tussen toediening en afname (uur) 'Dal' betekent: prik bloed tenminste 4 uur na inname, bij voorkeur vlak voor nieuwe gift; achter 'Top' staat de optimale priktijd vermeld (3)	Bepalingsfrequentie / maximale uitslagtermijn (in dagen)	Werklijst GLIMS	Bepalingen in rondzending	Onafhankelijke controles worden meegenomen bij analyse	
Cortisol vrij	Ja	A_Cortisol_vrij_urine_X_URN (hiermee wordt de berekening gedaan)	In beheer van het KCHL (zie LIS en iProva)	Interpretatie KCHL: CH.END.v01 Technische uitvoering KFL: volgt			U	In beheer van het KCHL (zie iProva)	In beheer van het KCHL (zie iProva)	Diepvries -20°C, ruimte C2-28	Zie L20	Bepalingen voor het KCHL		14	VLA_KCHL_Cortisol	SKML	Ja	
Cortisol vrij	Ja	A_Cortisol-speek_X_SPE	In beheer van het KCHL (zie LIS en iProva)	Interpretatie KCHL: CH.END.v01 Technische uitvoering KFL: volgt			SP	In beheer van het KCHL (zie iProva)	In beheer van het KCHL (zie iProva)	Diepvries -20°C, ruimte C2-28	Zie L20	Bepalingen voor het KCHL		14	VLA_KCHL_Cortisol	SKML	Ja	
CYP1A2	Ja	A_X-CYP1A2_X_BLD		N.v.t.			B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t., externe bepaling	Overigen			30 (Erasmus) Aanvraagformulier	VLA_Uitb-Erasmus-inv	SKML en Referenzinstitut Fur Biolanalytik	Ja
CYP2B6	Ja	A_X-CYP2B6_X_BLD		N.v.t.			B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t., externe bepaling	Overigen			30 (Erasmus) Aanvraagformulier	VLA_Uitb-Erasmus-inv	SKML en Referenzinstitut Fur Biolanalytik	Ja
CYP2C19	Ja	A_X-CYP2C19_X_BLD		N.v.t.			B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t., externe bepaling	Overigen			30 (Erasmus) Aanvraagformulier	VLA_Uitb-Erasmus-inv	SKML en Referenzinstitut Fur Biolanalytik	Ja
CYP2C8	Ja	A_X-CYP2C8_X_BLD		N.v.t.			B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t., externe bepaling	Overigen			30 (Erasmus) Aanvraagformulier	VLA_Uitb-Erasmus-inv	SKML en Referenzinstitut Fur Biolanalytik	Ja
CYP2C9	Ja	A_X-CYP2C9_X_BLD		N.v.t.			B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t., externe bepaling	Overigen			30 (Erasmus) Aanvraagformulier	VLA_Uitb-Erasmus-inv	SKML en Referenzinstitut Fur Biolanalytik	Ja
CYP2D6	Ja	A_X-CYP2D6_X_BLD		N.v.t.			B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t., externe bepaling	Overigen			30 (Erasmus) Aanvraagformulier	VLA_Uitb-Erasmus-inv	SKML en Referenzinstitut Fur Biolanalytik	Ja
CYP3A4	Ja	A_X-CYP3A4_X_BLD		N.v.t.			B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t., externe bepaling	Overigen			30 (Erasmus) Aanvraagformulier	VLA_Uitb-Erasmus-inv	SKML en Referenzinstitut Fur Biolanalytik	Ja
CYP3A5	Ja	A_X-CYP3A5_X_BLD		N.v.t.			B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t., externe bepaling	Overigen			30 (Erasmus) Aanvraagformulier	VLA_Uitb-Erasmus-inv	SKML en Referenzinstitut Fur Biolanalytik	Ja
Dabigatran	Ja	A_Dabigatran_X_EDTA	Normaalwaarden (let op: géén streefwaarden): 1dd 220 mg; top: 30-160 µg/l – dal: 10-40 µg/l 2dd 150 mg; top: 64-443 µg/l – dal: 31-225 µg/l 2dd 110 mg; top: 80-200 µg/l – dal: 40-150 µg/l	KF.TDM.02	Pradaxa		P	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	8 dagen bij 2-8°C. Daarna nog 7 dagen bij -20°C of 14 dagen bij -70°C	Overigen	Dal en/of top	14	VLA_NOACs	ECAT EQA	Ja	
Diazepam Desmethyldiazepam	Ja	A_Diazepam_X_EDTA A_Dmdiazepam_X_EDTA	S: 0,125-0,750 S: 0,300-0,800	KF.TDM.02	Valium, Nordiazepam	L4	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	30 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Benzodiazepines	LGC PT	Ja	
Digoxine	Ja		S: 0,5-1,2 µg/l	Interpretatie KFL: KF.TDM.03 Technische uitvoering KCHL: KF.TDM Vast element 01	Lanoxin	L12	LHB	Li-heparine plasma/barrior buis 1x5,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Zie L20	Anti-arrhythmica & Cardionica	Minimaal 6 uur na inname	Dagelijks		KKGT	Ja	
Diuretica screening	Ja	A_X-Diuretica-screening_X_URN	N.v.t. Kwalitatieve screening	N.v.t.			U	Urine 1x8,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t., externe bepaling	Toxicologie	N.v.t.	Dagelijks (MUMC)	VLA_Uitb-MUMC-KF-inv	UMCU en AHZ	Ja	
Dosulepine	Ja	A_Dosulepine_X_EDTA	S: 0,100-0,300	KF.TDM.02	Prothiaden	L12	P / S ¹⁾	EDTA-bloed 1x4,0 ml	materiaal na afname bij binnenkomst op KCHL 10 minuten centrifugeren; plasma afpipetteren en in koelkast opslaan.	Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	24 uur voorafgaand aan centrifugeren. Daarna 7 dagen.	Psychofarmaca	Dal	3, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_1	LGC PT	Ja	
DPD	Ja	K_X-DPD_X_EDTA		N.v.t.	Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPYD)	L31	B (EDTA)	EDTA-bloed 4x10,0 ml	Let op: afname kan alléén in VieCuri Vanlo. Laatste afnamemogelijkheid elke werkdag voor 12 uur.	Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Op dezelfde dag van afname versturen	Overigen	n.v.t. (vóór start behandeling)	10 (MUMC)	VLA_Uitb-MUMC-KC-inv	SKML	Ja	

Geneesmiddel (inclusief metabolieten)	Gevalideerd	Mnemonic GLIMS	Therapeutische ref. waarde (mg/l) (2)	Verwijzing ISO 15189 scope*	Synoniem	Literatuur-referentie (4)	Materiaal (1)	Hoeveelheid materiaal	Monstervoorbereiding	Opslag-condities	Bewaartermijn monster	Geneesmiddelen-groep	Tijd tussen toediening en afname (uur) 'Dal' betekent: prik bloed tenminste 4 uur na inname, bij voorkeur vlak voor nieuwe gift; achter 'Top' staat de optimale priktijd vermeld (3)	Bepalingsfrequentie / maximale uitslagtermijn (in dagen)	Werklijst GLIMS	Bepalingen in rondzending	Onafhankelijke controles worden meegenomen bij analyse
Duloxetine	Ja	A_Duloxetine_X_EDTA	S: 0,010-0,100	KF.TDM.02	Cymbalta	L12	P / S ¹⁾	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	4 dagen	Psychofarmaca	Dal	3, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_1	LGC PT	Ja
Edoxaban	Ja	A_Edoxaban_X_EDTA	Normaalwaarden (let op: géén streefwaarden): Top: 120-250 µg/l – dal: 10-40 µg/l	KF.TDM.02	Lixiana		P	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Nog te bepalen	Overigen	Dal en/of top	14	VLA_NOACs	ECAT EOA	Ja
Endoxifen	Ja	A_X-Endoxifen_X_BLD	>5,9 µg/l	N.v.t.	Tamoxifen	L35	B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	1 week bij kamertemp. (verzending)	Overigen	Willekeurig, mits minimaal 4 maanden na start	10 (Antoni van Leeuwenhoek)	VLA_Uitb-AvL-inv	SKML, uitwisselingen met andere instellingen	Ja
Escitalopram Desmethylescitalopram	Ja	A_Escitalopram_X_EDTA A_Dmescitalopram_X_EDTA	S: 10,0-100,0 µg/l Toxisch: 200-300 S: 0,025-0,050	KF.TDM.02	Lexapro	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Psychofarmaca	Dal	3, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_1	LGC PT	Ja
Ethanol	Ja			Interpretatie KFL: KF.TOX.03 Technische uitvoering KCHL: KF.TOX Vast element 01		L4	LHB	Li-heparine plasma/barrior buis 1x5,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Zie L20	Toxicologie		Dagelijks		LGC PT	Ja
Ethosuximide	Ja	A_Ethosuximide_X_EDTA	S: 40,0-100,0	N.v.t.	Ethymal	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Diepvries -20°C, ruimte C2-28	14 dagen in diepvries	Anti-epileptica	Dal	7 (UMCU)	VLA_Anti-epil_overig	SKML	Ja
Ethyleenglycol	Ja	A_Ethyleenglycol_X_EDTA	Toxisch: > 200	Valt buiten de ISO 15189 scope		L4	B (EDTA) ¹⁾	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t.; acuut toxicologisch onderzoek	Toxicologie		Afleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker	VLA_Toxicologie	LGC PT	Ja
Ethylglucuronide (EIG)	Ja	A_X-Ethylglucuronide_X_URN	Kwalitatief	N.v.t.	EIG		U	Urine 1x8,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t. externe bepaling	Overigen		7 (AHZ)	VLA_Uitb-ApHaags-inv	Referenzinstut Fur Bioanalytik	Ja
Everolimus	Ja	A_Everolimus_X_BLD	Dal: 3,0-8,0 µg/l	KF.TDM.02	Afinitor	L12	B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Immunosuppressiva	Dal, tenzij C2 geprikt wordt.	5, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Immunosuppressiv	LGC PT	Ja
Fenobarbital	Ja	A_Fenobarbital_X_EDTA	S: 10,0-40,0	KF.TDM.02		L12	P / S ¹⁾	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Anti-epileptica	Dal	7	VLA_Anti-epil_overig	LGC PT	Ja
Fenytoïne	Ja	A_Fenytoïne_X_EDTA	S: 8,0-20,0	KF.TDM.02	Diphantoïne	L12	P / S ¹⁾	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	24 uur	Anti-epileptica	Dal	3	VLA_Anti-epileptica	LGC PT	Ja
Flecainide	Ja	A_Flecainide_X_EDTA	Dal: 0,2-1,0	KF.TDM.02	Tamboor		P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen in diepvries	Anti-arrhythmica & Cardionica	Dal	7	VLA_Antiarrhythmica	LGC PT	Ja
Flucloxacilline	Ja	A_Flucloxacilline_X_EDTA A_Flucloxacilline-vrij-f_x_EDTA	Plasma totaal: < 125,0 Plasma vrij: > 0,5	Valt buiten de ISO 15189 scope	Floxapen	Onderzoek volgt	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	24u in koeling, 30 dagen in diepvries	Antibiotica	N.v.t. bij continue toediening	4	VLA_Antibiotica	KKGT pilot	nee
Flunitrazepam	Ja	A_Flunitrazepam_X_EDTA	S: toxisch vanaf 0,05	Valt buiten de ISO 15189 scope		L4	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	3 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Benzodiazepines	N.v.t.	Ja
Fluoxetine Norfluoxetine	Ja	A_Fluoxetine_X_EDTA A_Norfluoxetine_X_EDTA	S: 0,100-0,450 S: 0,050-0,350	KF.TDM.02	Prozac	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Sertra-en-Fluox	LGC PT	Ja
Flupentixol	Ja	A_Flupentixol-ois_X_EDTA	S: 1,0-15,0 µg/l	KF.TDM.02	Fluanzol	L27	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	48 uur in koelkast	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Antipsych	KKGT	Ja
Fluvoxamine	Ja	A_Fluvoxamine_X_EDTA	S: 0,050-0,250	KF.TDM.02	Fevarin	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Psychofarmaca	Dal	3, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_1	LGC PT	Ja
Gabapentine	Ja	A_Gabapentine_X_EDTA	S: 2,0-20,0	KF.TDM.02	Neurontin	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	28 dagen in diepvries	Anti-epileptica	Dal	3	VLA_Anti-epileptica	LGC PT en KKGT	Ja
Gentamicine	Ja		Volwassenen en kind > 1 maand Top: 15,0-20,0 Dal: < 1,0 Endocarditis Top: > 5,0 Dal: < 1,0 Neonaat Top: 8,0-12,0 Dal: < 1,0	Interpretatie KFL: KF.TDM.03 Technische uitvoering KCHL: KF.TDM Vast element 01	Garamycine	L12	LHB	Li-heparine plasma/barrior buis 1x5,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Zie L20	Antibiotica	Vlak vóór en tenminste 0,5 uur na einde inlopen infuus (inlopen gedurende 30 minuten). Bij HD (hemodialyse): Afname dialyspiegel voor dialysesessie	Dagelijks		KKGT	Ja

Geneesmiddel (inclusief metabolieten)	Gevalideerd	Mnemonic GLIMS	Therapeutische ref. waarde (mg/l) (2)	Verwijzing ISO 15189 scope*	Synoniem	Literatuur-referentie (4)	Materiaal (1)	Hoeveelheid materiaal	Monstervoorbewerking	Opslag-omstandigheden	Bewaartermijn monster	Geneesmiddelen-groep	Tijd tussen toediening en afname (uur) 'Dal' betekent: prik bloed tenminste 4 uur na inname, bij voorkeur vlak voor nieuwe gift; achter 'Top' staat de optimale prik-tijd vermeld (3)	Bepalingsfrequentie / maximale uitslagtermijn (in dagen)	Werklijst GLIMS	Bepalingen in rondzending	Onafhankelijk e controles worden meegenomen bij analyse
GHB	Ja	A_GHB_X_URN	Toxisch: > 10,0	Vaait buiten de ISO 15189 scope		L4	U	Urine 1x8,5 ml	materiaal na afname bij binnenkomst invriezen bij -20°C	Diepvries -20°C, ruimte C2-28	Bewaring max 7 dagen bij -20C	Toxicologie		Aleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker; Externe aanvragers: 7 dagen	VLA_Toxicologie	LGC PT	Ja
Golimubab IgG tegen golimumab	Ja	A_X-Golimubab_X_SER A_X-IgG-tegen-golimubab_X_SER	> 1,4	N.v.t.	Simponi		S	Serum Stolbuis 1x5,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t., externe bepaling	Overigen	Dal	14 (Sanquin)	VLA_Uitb-Sanquin-inv	Round Robin	Ja
Haloperidol	Ja	A_Haloperidol_X_EDTA	S: 1,0-15,0 µg/l	KF.TDM.02	Haldol	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Antipsych	LGC PT	Ja
HIAA(-5)	Ja	A_HIAA-5_X_URN (hiermee wordt de berekening gedaan)	In beheer van het KCHL (zie LIS en iProva)	Interpretatie KCHL: CH.END.v01 Technische uitvoering KFL: volgt			U	In beheer van het KCHL (zie iProva)	In beheer van het KCHL (zie iProva)	Diepvries -20°C, ruimte C2-28	Zie L20	Bepalingen voor het KCHL		10	VLA_KCHL_HIAA	SKML	Ja
Homocysteïne	Ja	K_HCYN_X_NAF (nuchter) K_HCYNX_X_NAF (niet nuchter)	In beheer van het KCHL (zie LIS en iProva)	Interpretatie KCHL: CH.KCA.v02 Technische uitvoering KFL: volgt			ENFP	In beheer van het KCHL (zie iProva)	In beheer van het KCHL (zie iProva)	Diepvries -20°C, ruimte C2-28	Zie L20	Bepalingen voor het KCHL		14	VLA_KCHL_Homocysteïn	SKML	Ja
Imatinib	Ja	A_Imatinib_X_EDTA	Dal: GIST: ≥1100 µg/L; CML: ≥ 1000 µg/l	N.v.t.	Glivec	L35	P	EDTA-bloed 1x4,0 ml	Gecentrifugeerde monster verzenden	Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	min. 48u bij kamertemp. tijdens verzending	Overigen	dal	10 (Antoni van Leeuwenhoek)	VLA_Uitb-AvL-inv	SKML, Radboud, EMC	Ja
Imipramine Desipramine Som imi+desi	Ja	A_Imipramine_X_EDTA A_Desipramine_X_EDTA A_Som-imi-desi_X_EDTA_int	N.v.t. N.v.t. S: 0,100-0,300	KF.TDM.02		L12	P / S ¹⁾	EDTA-bloed 1x4,0 ml	materiaal na afname bij binnenkomst op KCHL 10 minuten centrifugeren; plasma afpipetteren en in koelkast opslaan.	Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	24 uur voorafgaand aan centrifugeren. Daarna 7 dagen.	Psychofarmaca	Dal	7, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_2	LGC PT	Ja
Infliximab IgG tegen infliximab	Ja	A_Infliximab_X_SER A_X-IgG-tegen-infliximab_X_SER	S: 3,0-12,0 Referentiewaardes uitvoerend laboratorium	Interpretatie KFL: KF.TDM.03 Technische uitvoering MMB: MM.VID Vast element 16	Remicade, Inflectra, Zessly	L32,33	S	Serum Stolbuis 1x5,0 ml		Diepvries 20°C, ruimte C2-28	1 maand	Overigen	Dal	14 14 (Sanquin)	N.v.t. VLA_Uitb-Sanquin-inv	CTCB en Round Robin	Ja
Itraconazol Hydroxy-itraconazol Som itra+hydroxy-itra	Ja	A_Itraconazol_X_EDTA A_Hydroxy-itraconazol_X_EDTA A_Som-itra+hydroxy-itra_X_EDTA_int	N.v.t. N.v.t. Therapeutisch: S: 1,0-4,0 Als profylaxe: > 0,5 Toxisch: > 6,0	KF.TDM.02	Trisporal	L28	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Antibiotica	Dal	Dal:spiegel in steady state (=na 7 tot 14 dagen na start of dosiswijziging)	VLA_Antimycotica	LGC PT	Ja
Lacosamide	Ja	A_Lacosamide_X_EDTA	S: 3,0-15,0	KF.TDM.02	Vimpat	L19	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Anti-epileptica	Dal	7	VLA_Anti-epileptica	LGC PT	Ja
Lamotrigine	Ja	A_Lamotrigine_X_EDTA	S: 2,5-15,0	KF.TDM.02	Lamictal	L12	P / S ¹⁾	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Anti-epileptica	Dal	7	VLA_Anti-epileptica	LGC PT	Ja
Levetiracetam	Ja	A_Levetiracetam_X_EDTA	S: 5,0-40,0	KF.TDM.02	Keppra	L36	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Anti-epileptica	Dal	7	VLA_Anti-epileptica	LGC PT	Ja
Levomepromazine	Ja	A_Levomepromazine_X_EDTA	S: 0,025-0,150	Vaait buiten de ISO 15189 scope	Nozinan	L5	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t.; acuut toxicologisch onderzoek	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Antipsych	N.v.t.	Ja
Lithium	Ja		S: <70 jaar streef 0,4-1,0 mmol/l S: >70 jaar streef 0,4-0,8 mmol/l	Interpretatie KFL: KF.TDM.03 Technische uitvoering KCHL: KF.TDM Vast element 01	Priadel, Camcolit	L4	S	Serum Stolbuis 1x5,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Zie L20	Psychofarmaca	12u na inname of dalspiegel bij 3-4 daags doseren	Dagelijks		KKGT	Ja
Lorazepam	Ja	A_Lorazepam_X_EDTA	0,030-0,100 Toxisch: > 0,300	KF.TDM.02		L5	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	30 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Benzodiazepines	LGC PT	Ja
Lormetazepam	Ja	A_Lormetazepam_X_EDTA	S: 2,0-10,0 µg/l	Vaait buiten de ISO 15189 scope		L5	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	3 dagen	Psychofarmaca	Top (1,5u na inname)	7	VLA_Benzodiazepines	N.v.t.	Ja
Lurasidon	Ja	A_Lurasidon_X_EDTA	S: 15,0-40,0 µg/l	Vaait buiten de ISO 15189 scope	Latuda	L26	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	72 uur (3 maanden bij 20°C)	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Antipsych_overig	Nee	Nee
Mercaptopurine 6-TG 6-MMP	Ja	profiel A_X-6-Thioguanine_X_LHB A_X-6-MMP_X_LHB	N.v.t.; werkzame metabolieten 6-TG en 6-MMP worden bepaald S: 250-500 pmol/8x10 ⁹ RBC S: < 7000 pmol/8x10 ⁹ RBC	KF.TDM.02	Puri-Nethol, 6-MP, 6MP	L12	B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Immunosuppressiva	Dal	7	VLA_Thiopurines	KKGT	Ja
Meropenem	Ja	A_Meropenem_X_EDTA	S: 0,5-20,0	KF.TDM.02	Meropenem	Onderzoek volgt	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Onderzoek volgt	Antibiotica	N.v.t. bij continue toediening	7	VLA_Antibiotica	Instand Düsseldorf	Ja

Geneesmiddel (inclusief metabolieten)	Gevalideerd	Mnemonic GLIMS	Therapeutische ref. waarde (mg/l) (2)	Verwijzing ISO 15189 scope*	Synoniem	Literatuur-referentie (4)	Materiaal (1)	Hoeveheid materiaal	Monstervoorbereiding	Opslag-omstandigheden	Bewaartermijn monster	Geneesmiddelen-groep	Tijd tussen toediening en afname (uur) 'Dal' betekent: prik bloed tenminste 4 uur na inname, bij voorkeur vlak voor nieuwe gift; achter 'Top' staat de optimale prik-tijd vermeld (3)	Bepalingsfrequentie / maximale uitslagtermijn (in dagen)	Werklijst GLIMS	Bepalingen in rondzending	Onafhankelijke controles worden meegenomen bij analyse
Metanefrine Normetanefrine	Ja	A_Metanefrine_X_URN (hiermee wordt de berekening gedaan) A_Normetanef_X_URN (hiermee wordt de berekening gedaan)	In beheer van het KCHL (zie LIS en iProva)	Interpretatie KCHL: CH.END.v01 Technische uitvoering KFL: volgt			U		In beheer van het KCHL (zie iProva)	Diepvries -20°C, ruimte C2-28	Zie L20	Bepalingen voor het KCHL		14	VLA_KCHL_Metanefrine	SKML	Ja
Methadon	Ja		Kwalitatief	Interpretatie KFL: KF_TOX.03 Technische uitvoering KCHL: KF_TOX Vast element 01	Symoron, DOA screening		U	Urine 1x8,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Zie L20	Toxicologie		Dagelijks		KKGT	Ja
Mefenol	Ja	A_Mefenol_X_BLD	Toxisch: > 200	Valt buiten de ISO 15189 scope		L4	B (EDTA) ¹⁾	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t.; acuut toxicologisch onderzoek	Toxicologie		Aleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker	VLA_Toxicologie	LGC PT	Ja
Methotrexaat	Ja	A_X-Methotrexaat_X_EDTA	Referentiewaardes uitvoerend laboratorium	N.v.t.	MTX		P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Overigen		14 (Erasmus) Aanvraagformulier	VLA_Uitb-Erasmus-inv	KKGT	Ja
Methylfenidaat Ritalinezuur	Ja	A_Methylfenidaat_X_URN A_Ritalinezuur_X_URN	Kwalitatief	KF_TOX.02	Ritalin		U	Urine 1x8,5 ml	materiaal na afname bij binnenkomst invriezen bij -20°C	Diepvries -20°C, ruimte C2-28	Onderzoek volgt	Toxicologie		7	VLA_Toxicologie	N.v.t.	N.v.t.
Methylmalonzuur	Ja	A_Methylmalonzuur_X_LHB	In beheer van het KCHL (zie LIS en iProva)	Interpretatie KCHL: CH_KCA.v02 Technische uitvoering KFL: volgt			LHB / S	In beheer van het KCHL (zie iProva)	In beheer van het KCHL (zie iProva)	Diepvries -20°C, ruimte C2-28	Zie L20	Bepalingen voor het KCHL		14	VLA_KCHL_Methylmalon	SKML	Ja
Metronidazol	Ja	A_Metronidazol_X_EDTA	Plasma totaal topspiegel: ≥ 32,0 Plasma totaal dalspiegel: Dal nog onvoldoende over bekend	Valt buiten de ISO 15189 scope	Flagyl	Onderzoek volgt	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Onderzoek volgt	Antibiotica	Top: half uur na inlopen infuus	7	VLA_Antibiotica	nee	nee
Mianserine	Ja	A_Mianserine_X_EDTA	S: 0,020-0,090	KF.TDM.02	Tolvon	L5	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Geen gegevens bekend	Psychofarmaca	Dal	7, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_1	LGC PT	Ja
Midazolam α-OH-midazolam	Ja	A_Midazolam_X_EDTA A_α-OH-midazolam_X_EDTA	S: 0,100-1,500	KF.TDM.02	Dormicum	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Benzodiazepines	LGC PT	Ja
Mirtazapine Desmethylmirtazapine Son mirta-dmirta	Ja	A_Mirtazapine_X_EDTA A_Dmirtazapine_X_EDTA A_Son-mirta-dmirta_X_EDTA_int	S: 0,030-0,080 N.v.t. S: 0,050-0,160	KF.TDM.02	Remeron	L4	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	28 dagen in diepvries	Psychofarmaca	Dal	7, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_1	LGC PT	Ja
Moclobemide	Ja	A_Moclobemide_X_EDTA	S: 0,400-1,000	KF.TDM.02	Aurorix	L4	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Nog geen gegevens bekend	Psychofarmaca	Dal	7, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_1	LGC PT	Ja
Mycofenolzuur	Ja	A_Mycofenolzuur-dal_X_EDTA A_Mycofenolzuur-top_X_EDTA	Dal: 1,0-3,0 Top: 5,0-15,0	KF.TDM.02	Celcept	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Immunosuppressiva	Dal & Top	3	VLA_Immunosuppressiv	LGC PT	Ja
Natalizumab IgG tegen natalizumab	Ja	A_X-natalizumab_X_SER A_X-IgG-tegen-natali_X_SER	Referentiewaardes uitvoerend laboratorium	N.v.t.	Tysabri		S	Serum Stolbuis 1x5,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t.; externe bepaling	Overigen	Dal	14 (Sanquin)	VLA_Uitb-Sanquin-inv	Round Robin	Ja
Notriptyline E-10-OH-notriptyline Z-10-OH-notriptyline	Ja	N.v.t.	S: 0,050-0,150 N.v.t. N.v.t.	KF.TDM.02 E- en Z-OH not: Valt buiten de ISO 15189 scope	Nortrilen	L4	P / S ¹⁾	EDTA-bloed 1x4,0 ml	materiaal na afname bij binnenkomst op KCHL 10 minuten centrifugeren; plasma afspijteren en in koelkast opslaan.	Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	24 uur voorafgaand aan centrifugeren. Daarna 7 dagen.	Psychofarmaca	Dal	7, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_2	LGC PT	Ja
Olanzapine	Ja	A_Olanzapine_X_EDTA	S: 0,020-0,080	KF.TDM.02	Zyprexa	L4	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Antipsych	LGC PT	Ja
Onbekend geneesmiddel bloed	N.v.t.	A_Onb-gemm-bld_X_BLD		N.v.t.			P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28		Toxicologie		7, Op aanvraag	VLA_Overigen	N.v.t.	N.v.t.
Onbekend geneesmiddel urine	N.v.t.	A_Onb-gemm-urin_X_URN		N.v.t.			U	Urine 1x8,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28		Toxicologie		7, Op aanvraag	VLA_Overigen	N.v.t.	N.v.t.
Opialen	Ja		Kwalitatief	Interpretatie KFL: KF_TOX.03 Technische uitvoering KCHL: KF_TOX Vast element 01	DOA screening		U	Urine 1x8,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Zie L20	Toxicologie		Dagelijks		KKGT	Ja
Oxazepam	Ja	A_Oxazepam_X_EDTA	S: 1,0-2,0	KF.TDM.02	Seresta	L4	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Benzodiazepines	LGC PT	Ja
Oxcarbazepine Monohydroxycarbazepine	Ja	A_Oxcarbazepine-monoOH_X_EDTA	N.v.t.; werkzame metaboliet wordt bepaald S: 7,0-35,0	KF.TDM.02	Trileptal	L12	P / S ¹⁾	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Anti-epileptica	Dal	7	VLA_Anti-epileptica	LGC PT	Ja

Geneesmiddel (inclusief metabolieten)	Gevalideerd	Mnemonic GLIMS	Therapeutische ref. waarde (mg/l) (2)	Verwijzing ISO 15189 scope*	Synoniem	Literatuur-referentie (4)	Materiaal (1)	Hoeveheid materiaal	Monstervoorbereiding	Opslag-omstandigheden	Bewaartermijn monster	Geneesmiddelen-groep	Tijd tussen toediening en afname (uur) 'Dal' betekent: prik bloed tenminste 4 uur na inname, bij voorkeur vlak voor nieuwe gift; achter 'Top' staat de optimale priktijd vermeld (3)	Bepalingsfrequentie / maximale uitslagtermijn (in dagen)	Werklijst GLIMS	Bepalingen in rondzending	Onafhankelijk e controles worden meegenomen bij analyse
Paliperidon	Ja	A_Paliperidon_X_EDTA	S: 0,010-0,090	KF.TDM.02	Xeplion, Trevicta		P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	3 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Antipsych	LGC PT	Ja
Paracetamol	Ja		S: 10,0-20,0	Interpretatie KFL: KF_TOX.03 Technische uitvoering KCHL: KF_TOX Vast element 01		L4	LHB	Li-heparine plasma/barrior buis 1x5,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Zie L20	Toxicologie		Dagelijks		LGC PT	Ja
Paroxetine	Ja	A_Paroxetine_X_EDTA	S: 0,020-0,200	KF.TDM.02	Seroxat	L4	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Psychofarmaca	Dal	7, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_1	LGC PT	Ja
Pazopanib	Ja	A_Pazopanib_X_EDTA	Dal: ≥ 20,0	N.v.t.	Votient	L35	P	EDTA-bloed 1x4,0 ml	Gecontroleerde monster verzending	Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	min. 24u bij kamertemp. tijdens verzending	Overigen	dal	10 (Antoni van Leeuwenhoek)	VLA_Uitb-AvL-inv	SKML, Radboud, EMC	Ja
Pentfuridol	Ja	A_Pentfuridol_X_EDTA	S: 0,004-0,025	n.v.t.	Acemap		S	Serum Stolbuis 1x5,0 ml		Diepvries 20°C, ruimte C2-28	14 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Uitb-Gelre-Inv	KKGT	Ja
Perampanel	Ja	A_Perampanel_X_EDTA	0,180-1,000	Valt buiten de ISO 15189 scope	Fycopan	L5	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	28 dagen in diepvries	Anti-epileptica	Dal	7	VLA_Anti-epileptica	Nee	Ja
Pimozide	Ja	A_X-Pimozide_X_EDTA	S: 1,0-20,0 µg/l	N.v.t.	Orap	L5	P	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28		Psychofarmaca	Dal	7 (AHZ)	VLA_Uitb-ApHaags-inv	Eigen opgezet ringonderzoek, recent monster analyseren	Ja
Pipamperon	Ja	A_Pipamperon_X_EDTA	S: 0,100-0,400	KF.TDM.02	Dipiperon	L4	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Nog geen gegevens bekend	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Antipsych	KKGT	Ja
Piperacilline	Ja	A_Piperacilline_X_EDTA	Plasma totaal: 5,2-41,6 Plasma vrij: 4,0-32,0	KF.TDM.02		L30	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Onderzoek volgt	Antibiotica	N.v.t. bij continue toediening	7	VLA_Antibiotica	KKGT pilot & instant	Ja
Pregabalin	Ja	A_Pregabalin_X_EDTA	S: 2,0 – 8,3	KF.TDM.02	Lyrica		P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Anti-epileptica	Dal	7	VLA_Anti-epileptica	KKGT en LGC PT	Ja
Primidon	Ja	A_Primidon_X_EDTA	S: 10,0-15,0	KF.TDM.02	Mysoline	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Anti-epileptica	Dal	7	VLA_Anti-epileptica	LGC PT	Ja
Promethazine	Ja	A_Promethazine_X_EDTA	S: 0,100-0,400	Valt buiten de ISO 15189 scope			P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t.; acuut toxicologisch onderzoek	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Antipsych	N.v.t.	Ja
Quetiapine	Ja	A_Quetiapine_X_EDTA	S: 0,050-0,500	KF.TDM.02	Seroquel	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	21 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Antipsych	LGC PT	Ja
Risperidon 9-OH-risperidon Som risp+9-OH-rips	Ja	A_Risperidon_X_EDTA A_9-Hydroxyrisperidon_X_EDTA A_Som-rips-9-hydroxyrisp_X_EDTA_int	N.v.t. N.v.t. S: 0,010-0,090	KF.TDM.02	Risperdal	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	28 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Antipsych	LGC PT	Ja
Rivaroxaban	Ja	A_Rivaroxaban_X_EDTA	Normaalwaarden (let op: géén streefwaarden): 1dd 20 mg; top: 180-420 µg/l – dal: 5-140 µg/l 1dd 10 mg; top: 90-200 µg/l – dal: 1-40 µg/l	KF.TDM.02	Xarelto		P	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	8 dagen bij 2-8°C; Daarna nog 7 dagen bij 20°C of 14 dagen bij 70°C	Overigen	Dal en/of top	14	VLA_NOACs	ECAT EQA	Ja
Sertindol	Ja	A_Sertindol_X_EDTA	0,050-0,100	Valt buiten de ISO 15189 scope	Serdolect	L24	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	72 uur (2 maanden bij 20°C) ¹⁵	Psychofarmaca	Dal	10	VLA_Antipsych	N.v.t.	Ja
Sertraline Desmethylsertraline	Ja	A_Sertraline_X_EDTA A_Desmethylsertraline_X_EDTA	S: 0,050-0,300 S: 0,075-0,500	KF.TDM.02	Zoloft	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Sertra-en-Fluox	LGC PT	Ja
Sirolimus	Ja	A_Sirolimus_X_BLD	0-3 weken na niertransplantatie: Dal: 4-12 µg/l Na 3 weken: Dal: 12,0-20,0 µg/l	KF.TDM.02	Rapamune	L12	B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Immunosuppressiva	Dal	7, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Immunosuppressiv	LGC PT	Ja
Sulfamethoxazol Acetylsulfamethoxazol	Ja	A_X-Sulfamethoxazol_X_EDTA A_X-Acetylsulfamethox_X_EDTA	100,0-200,0 < 200,0	N.v.t.	Co-trimoxazol	L7	P	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Gekoeld max 3 dagen	Antibiotica	Dal en topspiegel	7, op woensdag (Erasmus) Aanvraagformulier	VLA_Uitb-Erasmus-inv	KKGT	Ja

Geneesmiddel (inclusief metabolieten)	Gevalideerd	Mnemonic GLIMS	Therapeutische ref. waarde (mg/l) (2)	Verwijzing ISO 15189 scope*	Synoniem	Literatuur-referentie (4)	Materiaal (1)	Hoeveheid materiaal	Monstervoorbereiding	Opslag-omstandigheden	Bewaartermijn monster	Geneesmiddelen-groep	Tijd tussen toediening en afname (uur) 'Dal' betekent: prik bloed tenminste 4 uur na inname, bij voorkeur vlak voor nieuwe gift; achter 'Top' staat de optimale priktijd vermeld (3)	Bepalingsfrequentie / maximale uitslagtermijn (in dagen)	Werklijst GLIMS	Bepalingen in rondzending	Onafhankelijk e controles worden meegenomen bij analyse
Sulpiride	Ja	A_Sulpiride_X_EDTA	S: 0,040-0,600	KF.TDM.02	Dogmatil	L15+L16+L17+L18	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Nog geen gegevens bekend	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Antipsych	KKGT en LGC PT	Ja
Sunitinib N-desethylsunitinib Som suni+desuni	Ja	A_Sunitinib_X_EDTA A_Desunitinib_X_EDTA A_Som-suni-desuni_X_EDTA_int	N.v.t. N.v.t. Interpretatie voor dalspiegel: Sunitinib + N-desethyl sunitinib: Therapeutisch bij intermitterend doseerschema: ≥ 50 - 75 ug/l Therapeutisch bij continu doseerschema: ≥ 37,5 - 75 ug/l Toxisch: somspiegel > 75 - 100 ug/l	N.v.t.	Sutent	L35	P	EDTA-bloed 1x4,0 ml	Ge centrifugeerde monster verzenden	Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	72 uur bij kamertemp. tijdens verzending	Overigen	dal	10 (Antoni van Leeuwenhoek)	VLA_Uitb-AvL-inv	SKML, Radoud, EMC	Ja
Tacrolimus	Ja	A_Tacrolimus_X_BLD	S: 4,0-15,0 µg/l	KF.TDM.02	Prograf, Advagraf	L12	B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	28 dagen	Immunosuppressiva	Dal	7, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Immunosuppressiv	LGC PT	Ja
Temazepam	Ja	A_Tamazepam_X_EDTA	S: 0,300-0,900	KF.TDM.02	Normison	L4	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t.; acuut toxicologisch onderzoek	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Benzodiazepines	LGC PT	Ja
THC	Ja		Kwalitatief	Interpretatie KFL: KF.TOX.03 Technische uitvoering KCHL: KF.TOX Vast element 01	DOA screening		U	Urine 1x8,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Zie L20	Toxicologie		Dagelijks		KKGT	Ja
Theofylline	Volgt nog	A_Theofylline_X_EDTA	S: 5,0-20,0	Valt buiten de ISO 15189 scope	Theolair	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Overigen	Dal	7	VLA_Overigen	LGC PT	Ja
Thioguanine (6-TG)	Ja	A_X-6-TG-Thiosix_X_LHB	S: < 900 pmol/8x10 ⁹ RBC	KF.TDM.02	Thiosix, 6TG, 6-thioguanine, thioguanine, thioguanine	L12	B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	7 dagen	Immunosuppressiva	Dal	7	VLA_Thiopurines	KKGT	Ja
Tobramycine	Ja	A_X-Tobramycine-top_X_SER A_X-Tobramycine-dal_X_SER	Volwassenen en kind > 15 jaar: Top: 15,0-20,0 Dal: < 1,0 Kinderen t/m 15 jaar en neonaten: Top: 8,0-10,0 Dal: < 1,0	N.v.t.	Obracin	L12	S	Serum Stolbuis 1x5,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Antibiotica	Dal vlak vóór (dal) en top tenminste 0,5 uur na einde inlopen infuus (inlopen gedurende 30 minuten). Bij HD (hemodialyse); Afname dalspiegel voor dialysesessie	Dagelijks (MUMC)	VLA_Uitb-MUMC-KF-inv	KKGT	Ja
Topiramaat	Ja	A_Topiramaat_X_EDTA	S: 2,0-20,0	KF.TDM.02	Topamax	L7	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Anti-epileptica	Dal	7	VLA_Anti-epileptica	KKGT en LGC PT	Ja
Toxicologische screening	Ja	A_Tox-screen-bld_X_EDTA	Kwalitatief	KF.TOX.02			P / S ¹⁾	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t.; acuut toxicologisch onderzoek	Toxicologie		2, Alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker	VLA_Toxicologie	N.v.t.	N.v.t.
TPMT NUDT15	Ja	K_X-TPMT_X_EDTA A_X-NUDT15_X_EDTA		Alleen de NUDT15 valt buiten de ISO 15189 scope	Thiopurine metabolisme (TPMT en NUDT15)	L31	B (EDTA)	EDTA-bloed 1x10,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Op dezelfde dag van afname versturen	Overigen	n.v.t. (vóór start behandeling)	10 (MUMC)	VLA_Uitb-MUMC-KC-inv	techniek via Sanger sequencing SKML en EMQN	TPMT: Ja NUDT15: Nee, Dat is bij deze techniek niet nodig omdat bv. de detectie van positieve controles, al in een eerder stadium zijn gevalideerd
Tranylcypromine	Ja	A_Tranlycypromine_X_EDTA	≤ 0,005	KF.TDM.02	Parnate	L5	P	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Diepvries -20°C, ruimte C2-28	14 dagen	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Psychofarmaca_1	KKGT	Ja
Trazodon	Ja	A_Trazodon_X_EDTA	S: 0,800-1,600	KF.TDM.02	Trazolan	L4	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Nog geen gegevens bekend	Psychofarmaca	Dal	7, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_1	LGC PT	Ja
UGT1A1	Ja	A_X-UGT1A1_X_BLD		N.v.t.		L31	B (EDTA)	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	5 dagen	Overigen	n.v.t.	14 (MUMC)	VLA_Uitb-MUMC-KC-inv	EMQN	Ja
Ustekinumab IgG tegen ustekinumab	Ja	A_X-Ustekinumab_X_SER A_X-IgG-tegen-usteki_X_SER	Referentiewaardes uitvoerend laboratorium	N.v.t.	Stelara		S	Serum Stolbuis 1x5,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t. externe bepaling	Overigen	Dal	14 (Sanquin)	VLA_Uitb-Sanquin-inv	Round Robin	Ja

Geneesmiddel (inclusief metabolieten)	Gevalideerd	Mnemonic GLIMS	Therapeutische ref. waarde (mg/l) (2)	Verwijzing ISO 15189 scope*	Synoniem	Literatuur-referentie (4)	Materiaal (1)	Hoeveelheid materiaal	Monstervorbereiding	Opslag-condities	Bewaartermijn monster	Geneesmiddelen-groep	Tijd tussen toediening en afname (uur) 'Dal' betekent: prik bloed tenminste 4 uur na inname, bij voorkeur vlak voor nieuwe gift; achter 'Top' staat de optimale priktijd vermeld (3)	Bepalingsfrequentie / maximale uitslagtermijn (in dagen)	Werklijst GLIMS	Bepalingen in rondzending	Onafhankelijk e controles worden meegenomen bij analyse
Valproïnezuur	Ja		S: 50,0-100,0	Interpretatie KFL: KF.TDM.03 Technische uitvoering KCHL: KF.TDM Vast element 01	Depakine	L12	LHB	Li-heparine plasma/barriercor buis 1x5,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Zie L20	Anti-epileptica	10-14u na inname	Dagelijks		KKGT	Ja
Vancomycine	Ja		AUC/MIC(0-24)≥ 400 uur*mg/L CAPD: Dal: > 12,0 mg/L	Interpretatie KFL: KF.TDM.03 Technische uitvoering KCHL: KF.TDM Vast element 01	Vancocin	L3	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Zie L20	Antibiotica	Bij intermitterend doseren: Dal: vlak voor nieuwe gift Top: 1 uur nadat volledig infuus is ingelopen Bij continue infusie: willekeurig moment	Dagelijks		KKGT	Ja
Vedolizumab IgG tegen vedolizumab	Ja	A_X-Vedolizumab_X_SER A_X-IgG-tegen-vedoliz_X_SER	Referentiewaarden uitvoerend laboratorium	N.v.t.	Entyvio		S	Serum Stobbuiscor buis 1x5,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	N.v.t., externe bepaling	Overigen	Dal	14 (Sanquin)	VLA_Uitb-Sanquin-inv	Round Robin	Ja
Venlafaxine Desmethylvenlafaxine Som venla+dmvenla	Ja	A_Venlafaxine_X_EDTA A_Dmvenlafaxine_X_EDTA A_Som-venla-dmvenla_X_EDTA_int	N.v.t. N.v.t. S: 0,100-0,400 Toxisch: > 1	KF.TDM.02	Eflexor	L4	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	72 uur	Psychofarmaca	Dal	7, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Psychofarmaca_1	LGC PT	Ja
Voriconazol	Ja	A_Voriconazol_X_EDTA	Dal: 1,0-6,0	KF.TDM.02	Vfend	L12	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Antibiotica	Dal	7, vaste bepalingdagen: ma-woe-vr	VLA_Antimycotica	LGC PT	Ja
Vortioxetine	Ja	A_Vortioxetine_X_EDTA	S: 0,005-0,030	KF.TDM.02	Brintellix		P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Onderzoek volgt	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Psychofarmaca_1	LGC PT	Ja
XTC	Ja		Kwalitatief	Interpretatie KFL: KF.TOX.03 Technische uitvoering KCHL: KF.TOX Vast element 01	DOA screening		U	Urine 1x8,5 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Zie L20	Toxicologie		Dagelijks		KKGT	Ja
Zolpidem	Ja	A_Zolpidem_X_EDTA	0,080-0,300 Toxisch: > 0,500	KF.TDM.02		L5	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	30 dagen	Psychofarmaca	topspiegel (1-3u na inname)	7	VLA_Benzodiazepines	LCG PT	Ja
Zonisamide	Ja	A_Zonisamide_X_EDTA	S: 15,0-40,0	KF.TDM.02	Zonegran		P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	14 dagen	Anti-epileptica	Dal	7	VLA_Anti-epileptica	LGC PT	Ja
Zopiclon	Ja	A_Zopiclon_X_EDTA	0,050-0,085 Toxisch: > 0,300	KF.TDM.02		L5	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	30 dagen	Psychofarmaca	topspiegel (1,5-2u na inname)	7	VLA_Benzodiazepines	LCG PT	Ja
Zuclopienxol	Ja	A_Zuclopienxol_X_EDTA	S: 0,004-0,050	KF.TDM.02	Cisordinol	L4	P / S	EDTA-bloed 1x4,0 ml		Koelkast 2-8°C, ruimte C2-28	Nog geen gegevens bekend	Psychofarmaca	Dal	7	VLA_Antipsych	LGC PT	Ja

* Indien de bepaling buiten de ISO 15189 scope M274 valt, wordt dit bij de uitslag in de rapportage vermeld. Alle overige uitslagen vallen daarmee automatisch binnen de scope.

1. Materiaal

In de even weken dient voor deze bepaling afwijkend materiaal afgenomen te worden: 2x serum stoblood (voor tox screen 3 buizen)

Dit vsm uitvoering dient door Zuyderland in de even weken (zie iProva docnr. 063634)

P: Plasma: bloed op te vangen in EDTA-buis

LHB: Li-heparine plasma Barriercor

ENFP: EDTA NaF plasma

S: Serum: bloed op te vangen in 'stof'-buis (stoblood) zonder gel

SP: Speeksel

B: Volbloed (EDTA)

DBS: Volbloed (DBS mitra tip)

H: Volbloed (Heparine) = Donkergroene buis/dop

U: Urine

L: Liquor

Het patiëntmateriaal wordt verpakt in een blister, deze wordt in een afgesloten safety-bag gestopt en vervolgens in een PolyMed etui gedaan.

2. Therapeutische referentiewaarde (mg/l)

Alle referentiewaarden gelden in mg/l tenzij in de tabel andere eenheden worden vermeld.

Hier zijn onafhankelijk van het geneesmiddel aangegeven:

Steady state concentraties:

De is het geval bij geneesmiddelen met een eliminatietijd, die groter is dan het toedieningsinterval. Zonder oplosdoos duurt het ongeveer 5 maal de halfwaardetijd voor eliminatie van het geneesmiddel tot de steady state concentratie is bereikt.

Top, Dal en Tussenspiegel:

Top: Topspiegel; achter 'Top' staat de optimale priktijd vermeld

Dal: Dalspiegel; prik bloed tenminste 4 uur na inname, bij voorkeur vlak voor nieuwe gift

S: Steady state

Tu: Tussenspiegel

3. Tijd tussen toediening en afname

De tijd die nodig is om een indruk te krijgen van de steady state spiegel bij orale toediening. De vermeldte tijd betreft het aantal uren na inname.

4. Bronnen

L1: De bepalingwijzer van UMCG; www.umcg.nl

L2: Geneesmiddel- Informatorium 2003, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

L3: Toegepaste Farmacokinetiek, VU, 1997

L4: www.toxicologie.org

L5: Henke et al. Consensus guidelines for therapeutic drug monitoring in neuropharmacology: update 2017. 2018 (51).Epub

L6: Lundbeck

L7: VuMC

L8: Janssen (Clin Microbiol Infect 2006;12(S7):97-106)

L9: Medscape (Pharmacotherapy 23 (5):592-602,2003)

L10: Basicmedicalkey

L11: OLVG

L12: www.tdm-monografie.nl

L13: UMC Utrecht

L14: Eucast

L15: Sweetman SC. Martindale: The complete Drug Reference. 35. The Pharmaceutical Press, London, 2007, pp. 119-692.

L16: Abdelal A, El-Enany N, Belal FF. Simultaneous determination of sulphide and its alkaline degradation product by second derivative synchronous fluorescence spectroscopy. Talanta. 2009;80:880-888.

L17: Amisulpride - dose, plasma concentration, occupancy and response: implications for therapeutic drug monitoring Acta Psychiatrica Scandinavica December 2009 , Volume 120, Issue 6, Pages 416-428

L18: Therapeutic drug monitoring for optimizing amisulpride therapy in patients with Schizophrenia Journal of psychiatric research Vol 41, Issue 8, Pages 673-679

L19: May, T.W., et al., Comparison of iacosamide concentrations in cerebrospinal fluid and serum in patients with epilepsy. Epilepsia, 2015. 56(7): p. 1134-40.

L20: iProva document Bewaarlijst onderzoeksmateriaal KCHL

L21: Sánchez-Aizcar A. Plasma concentrations of gabapentin in epileptic patients. J Clin Pharm Ther. 1996 Dec;21(6):393-8.

L22: Riccardi R, et al. L-asparaginase pharmacokinetics and asparagine levels in cerebrospinal fluid of rhesus monkeys and humans. Cancer Res. 1981 Nov;41(11 Pt 1):4554-8

L23: Fernandez CA, et al. High-Throughput Asparaginase Activity Assay in Serum of Children with Leukemia. Int J Clin Exp Med 6(7);2013: 478-87

L24: M. Grundmann, I.Kacirova, R. Urinovsky. Therapeutic drug monitoring of atypical antipsychotic drugs. Acta Pharm. 64 (2014) 387-401

L25: Choong E, et al. Therapeutic drug monitoring of seven psychotropic drugs and four metabolites in human plasma by HPLC-MS. J Pharm Biomed Anal. 2009;50(5):1000-9

L26: Pateet L, et al. High throughput identification and quantification of 16 antipsychotics and 8 major metabolites in serum using ultra-high performance LC-tandem MS. Clin Chem Acta 2014, Feb 15(429):51-8

L27: Che J, et al. Validation of a sensitive LC/MS/MS method for simultaneous quantification of flupentixol and mirtazapine in human plasma. J Pharm Biomed Anal. 2007 Dec 21;45(5):785-92

L28: Andes D et al. Antifungal Therapeutic Drug Monitoring: Established and Emerging Indications. Antimicrob Agents Chemother. 2009 Jan;53(1):24-34

L29: Manes S, et al. Quantitation of benzodiazepines in urine, serum, plasma and meconium by LC-MS-MS. J Analytical Toxic 2008;32:491-98

L30: Eucast.org/clinical_breakpoint

L31: https://www.eucast.org/clinical_breakpoint

L32: Papamichael K, Rakowsky S, Rivera C, Chelitz AS, Osterman MT. Association between serum infliximab trough concentrations during maintenance therapy and biochemical, endoscopic, and histologic remission in Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis. 2018;24(10):2266-2271

Geneesmiddel (inclusief metabolieten)	Gevalideerd	Mnemonic GLIMS	Therapeutische ref. waarde (mg/l) (2)	Verwijzing ISO 15189 scope*	Synoniem	Literatuur- referentie (4)	Materiaal (1)	Hoeveelheid materiaal	Monstervoorbewerking	Opslag-condities	Bewaartermijn monster	Geneesmiddelengroep	Tijd tussen toediening en afname (uur) 'Dal' betekent: prik bloed tenminste 4 uur na inname, bij voorkur vlak voor nieuwe gift; achter 'Top' staat de optimale priktijd vermeld (3)	Bepalingsfrequentie / maximale uitslagtermijn (in dagen)	Werklijst GLIMS	Bepalingen in rondzending	Onafhankelijk e controles worden meegenomen bij analyse
--	-------------	----------------	---	-----------------------------	----------	----------------------------------	------------------	--------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	---------------------	--	--	-----------------	---------------------------------	---

L33: Papamichael K, Rakowsky S, Rivera C, Chefetz AS, Osterman MT. Infliximab trough concentrations during maintenance therapy are associated with endoscopic and histologic healing in ulcerative colitis. *Aliment Pharmacol Ther.* 2018;47(4):478-484
L34: Ungar B, Levy I, Yavne Y, et al. Optimizing Anti-TNF- α Therapy: Serum Levels of Infliximab and Adalimumab Are Associated With Mucosal Healing in Patients With Inflammatory Bowel Diseases. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2016;14(4):550-557. e2
L35: <https://www.avl.nl/voorbereiding-afpraak/afdelingen-en-centra/laboratorium-van-de-apotheek/bepaling-van-orale-oncocytyca-in-biologisch-materiaal-bv-tdm/>
L36: Reimers et al. *Drug Des Devel Ther* 2016 Feb; 8:12:271-280.
L37: *Clin Psychopharmacol Neurosci.* 2022 May 31; 20(2): 398-401. ; Add-on Cariprazine in Patients with Long-term Clozapine Treatment and Treatment Resistant Schizophrenia: Two Cases of Psychotic Deterioration and Pisa Syndrome

Bij geneesmiddelen zonder literatuurverwijzing wordt uitgegaan van referentiewaarden welke afkomstig zijn uit de huidige inzichten en informatiebronnen opgesteld door de ziekenhuisapotheker met aandachtsgebied laboratorium van het VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg.